



ワイヤレス受信機(HB-RJ) ご利用の手引き ～ポール君～

ワイヤレスセットご利用の流れ

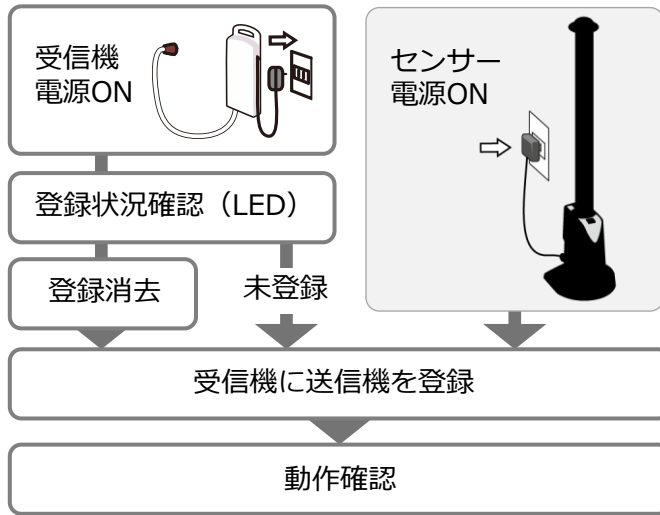


受信機操作ボタン/LED

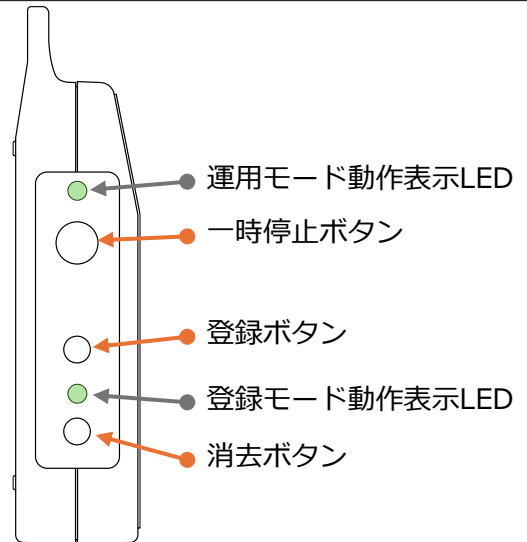


① 登録方法

※電源を切っても下記②の消去作業を行わない限り登録はされたままです。
※1つの受信機に対して送信機を5つまで登録することが可能です。


1.
LEDが赤緑交互点滅の登録なし状態かを確認し、一時停止ボタンと登録ボタンを同時に3秒以上押します。

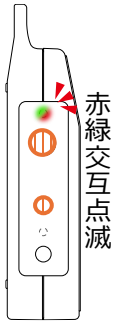

2.
約3秒経過し、受信機が登録待ち受け状態(LED:上下緑点灯)になったら、ボタンを放します。

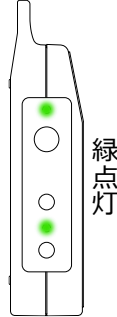

3.
送信機から信号を送る(ポール君の前を横切る)ことで登録されます。(LED:緑点灯)

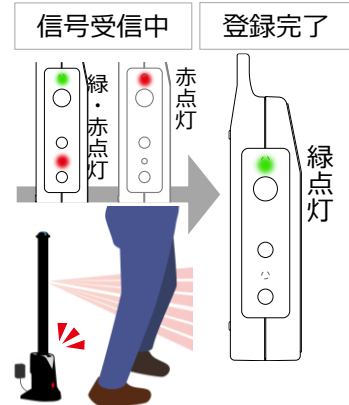


② 登録の消去方法

※登録された全てのデータが消去されます。

1.
受信機が登録状態(LED:緑点灯)なのを確認し、一時停止ボタンと消去ボタンを同時に3秒押します。




2.
約3秒経過後、下側のLEDが緑点滅はじめたらボタンを放します。上側のLEDが赤緑交互点滅をしたら消去完了です。

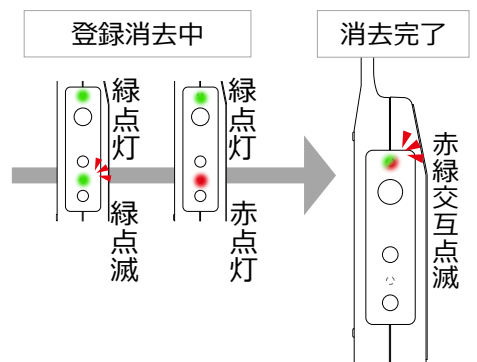

③ 一時停止機能について


1.

一時停止ボタンを押すことで一時的に送信機からの通報を無効にすることが出来ます。

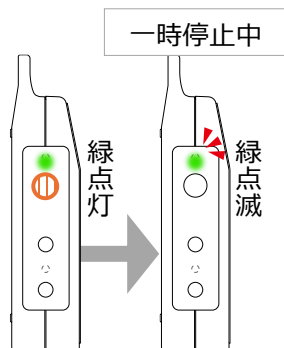

2.

再度一時停止ボタンを押す、または約5分経過することで通常の運用モードに戻ります。

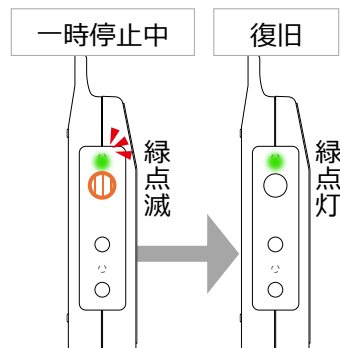

何もしていないのにナースコールが鳴ってしまう場合は……


電波異常通報機能または電池切れ通報機能が働いている可能性がございます。
対処方法につきましては下記をご参照ください。



● 電波異常通報機能

電波異常を赤点滅LEDとナースコールでお知らせする機能です。

- 送受信機が10m以上離れすぎている場合
- 6時間に1度の定期送信時に、送信機からの電波を受信できない場合（送信機の故障・電池残量なし）※受信機に複数の送信機を登録したままにすると起こる場合があります。

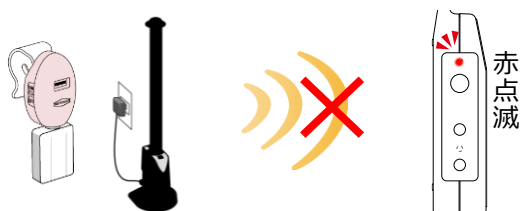

登録を一度消去し、再度ご使用される送信機のみを登録しなおしてください。

● 電池切れ通報機能

受信機に登録されている送信機の電池がなくなった際に、橙点滅LEDとナースコールでお知らせする機能です。



登録されている送信機の電池を交換してください。※ポール君はACアダプタ電源のため不要です。

受信機の電源が入る(緑点灯)、電池が新しい(正しい向きで入っている)、登録リセット・再登録したのに鳴らない場合は、プラグ部分の断線が疑われます。修理受付可能製品か確認の上、修理センターへお送りください。

動画マニュアルのご案内 (URL:https://www.hotron.co.jp/support/healthcare_sensor/healthcare_movie.html)

ワイヤレスセットと対応離床センサーの登録方法を動画でもご紹介しています▶



ワイヤレスセットの機能紹介動画はこちらから▶

